


mx Digitális hőmérő Használati utasítás

Model: THMD01

Mi a normál hőmérséklet?

Az általánosan elfogadott „normál” hőmérsékleti érték 37,0 C. A hőmérsékleti értékek 36,1–37,2 C között változhatnak, és továbbra is „normálisnak” tekinthetők. A hőmérsékleti ingadozások olyan tevékenységeknek tulajdoníthatók, mint például testmozgás, dohányzás, evés és ivás. Reggel alacsonyabb a hőmérsékleted, mint délután. Más eltérések oka lehet pl. a hőmérséklet leolvasásának helye. Míg a szájban mért hőmérséklet a korábban leírtakat követi, a végbélben mért hőmérséklet általában 0,5 C-kal magasabb, míg a hónalj alatti hőmérséklet 0,5 C-kal alacsonyabb

Az mx digitális hőmérő jellemzői

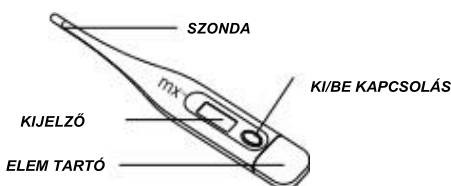

Hogy kell hőmérsékletet mérni?

1. Nyomja meg az ON / OFF gombot az aktiváláshoz. Az egység sípol és kijelzi ... **188.8**
Ezután a legutóbb mért hőmérsékletet egy „M” jelzéssel jelenítjük meg a jobb sarokban körülbelül 1 másodpercig.
2. Amikor L és villogó C jelenik meg, a hőmérő készen áll a hőmérséklet mérésére. Ha a hőmérséklet <32,0 C akkor a Lo C értéket, és ha a hőmérséklet >42,9 C, akkor a HI C értéket mutatja.
3. Mérés közben az LCD mindig a legmagasabb hőmérsékletet mutatja. A hangjelzés megszólal, amikor a hőmérséklet mérése befejeződött.
4. Ha láz van (>37,5 C), az egység 30 rövid sípoló hangot ad. Ha nincs láz (>37,5 C alatt), az egység 10 hosszú hangjelzést ad.
5. Nyomja meg az ON / OFF gombot az egység kikapcsolásához. (A készülék használat után körülbelül tíz perc múlva automatikusan kikapcsol.)

Orális hőmérséklet mérése

Helyezze a sonda hegyét a nyelv alá a lehető legközelebb a hősebbez. Hozzávetőleges mérési idő: 1 perc.

Hónalj hőmérséklet mérése

Törölje le a hónaljat száraz törülközővel és helyezze a sonda hegyét a kar alá úgy, hogy a hegye a testre merőlegesen érintkezzen a bőrrel. Helyezze a karját a mellmagasságba úgy, hogy a sonda hegyét jól eltakarja a kar.

Hozzávetőleges mérési idő: 2-3 perc.

Megjegyzés: Az axillaris hőmérséklet általában 0,5 C-kal alacsonyabb, mint az orális mérés.

Végbél hőmérséklet mérése

Vízzel oldható kenőanyagot vigyen fel a sonda fedelére. Óvatosan illessze be a szondát a végbélbe (legfeljebb 1,25 cm)

Hozzávetőleges mérési idő: 1 perc

Megjegyzés: A végbél hőmérséklet általában 0,5 C-kal magasabb, mint a szájban mért érték.

Általános információk

1. A hőmérőt csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
2. Hőmérséklet mérésközben ne járkaljon és ne beszéljen.
3. Ha nem használja a hőmérőt, tárolja a dobozában.
4. Ne tárolja az egységet olyan helyen, ahol közvetlen napfény, por vagy nedvesség érheti. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet.
5. Kerülni kell a hőmérő leesését vagy erős rázkódásnak való kitételét. Ne próbálja szétszerelni a hőmérőt, csak az elemet cserélje.

Elemcsere

A digitális hőmérő elemét ki kell cserélni, amikor a kijelző jobb alsó sarkában a „T” jelenik meg. Cserélje ki az akkumulátort 1,55 V, LR41 alkáli vagy SR41 ezüstoxid típusú azzal egyenértékűre.

Hogyan cseréljen elemet?

Húzza el az elemtartó fedelét a készüléktől.

Használjon nem fém, hegyes szerszámot az akkumulátor eltávolításához, és helyezze be az új elemet pozitív (+) oldalával felfelé.

Óvatosan csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a helyére.

Megjegyzés: Tartsa kisgyermekektől és hőtől távol.

Tisztítási utasítások

Minden használat előtt és után tisztítsa meg a hőmérőt puha ruhával és vízzel hígított izopropil-alkohollal, vagy mossa HIDEG szappanos vízzel. Az egység vízbe vagy alkoholba meríthető. Ne áztassa hosszabb ideig, és ne sterilizálja forrásban lévő vízben vagy forró gőzben.

Specifikációk

| | |
|-------------------------------|---|
| Mérési tartomány | 32.0°C ~ 42.9°C |
| Alacsony hőmérséklet kijelzés | |
| Magas hőmérséklet kijelzés | |
| Kijelző felbontása | 0.1°C |
| Pontosság | 35.5°C ~42.9°C : ±0.1°C other range: ± 0.2°C |
| Hangjelzés láz esetén | 30 rövid hangjelzés |
| Normál hőmérséklet esetén | 10 rövid hangjelzés |
| Automata kikapcsolás | ± 7 – 10 perc |
| Elem | LR41 or SR41 |
| Elem élettartama | 2 év |
| Dimezió | 128.1*18.5*10.5mm |
| Működési állapot | Hőmérséklet: 10°C ~40°C Humidity: 30%~85%RH |
| Tárolási feltételek | Hőmérséklet: -20°C ~60°C Humidity: 25%~90%RH |

Gyártó: medinox London, Solar House, Chase – Road, Lomdon N14 6NZ www.medinox.co.uk

Forgalmazó: AIM-Medical Kft, 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. www.aim-medival.hu

Tel: 06-1/4146-491; email: info@aim-medical.hu